

Paar sõna Dr. Cynthia Fee poolt:

Lugupeetud Ortodont,

Teie patsient ostis hiljuti SISU suukaitse. See on suurepärase uudis, sest see tähendab, et ta on pühendunud oma hammaste kaitsmisele kahju eest.

Palume, et aitaksite tal oma hambakaitset sobitada! Tahame veenduda, et meie kohandatud kaitsmed sobivad kõige paremini Teie patsiendi konkreetsete vajadustega. Lugege palun allpool olevat loendit ja küsimuste korral võtke julgelt ühendust.

-Kui SISU suukaitset kasutatakse breketite kohal kohas, kus toimub mõõdukas hammaste liigutamine (sageli ravi varases staadiumis), sobib kaitse tõenäoliselt lühikest aega enne kui on vaja jälle korrigeerida.

-Ideaalne tuleks patsiendile suukaitse paigaldada ortodontilise ravi sel ajal, kui toimub väiksem hammaste liikumine.

-Blokeeriv materjal (nt. Breketivaha) tuleb kasutada, et hambakaitse ei haarduks breketi ja traadi külge.

-Blokeeriva materjali liigne kasutamine põhjustab kehvemini hoidvat kaitset.

-Kui suukaitse on liiga tugevalt ümber, võib seda reguleerida kuumutades ainult konkreetset probleempiirkonda ning kohanda vastavalt vajadusele.

-Viimane, kuid mitte vähem tähtis; tuletage patsiendile alati meelde, et ta eemaldaks hambakaitsemed breketitelt ettevaatlikult.

Tänan Teid aja ja toetuse eest! Ja jällegi, küsimuste korral ärge kõhelge meiega ühendust võtta.

Armastusega SISU,

Dr. Cynthia Fee

info@sisuguard.ee